



# Mikrozyd® FAQs

マイクロジッドに関するQ and A



the plus of pure performance

## 効果について

シュルケ社の効果に対する実証試験方法は？

品質と信頼度は、医学上の消毒剤に適用される2つの重要な基準です。クロスタイプの製品は、絞り取った作用物質溶液を分析します。試験は、様々な保存条件にて保存された製品を、有効期限の全期間に渡って実施されます。

マイクロジッドの微生物学上の適用範囲は？

	バクテリア	菌類	ウイルス	結核菌
マイクロジッド® AF	VAH, EN 1276 prEN 13727	VAH, EN 1650 prEN 13624	HIV, HBV, HCV, Adeno	EN 14348
マイクロジッド® センシティブ	VAH, EN 1276 prEN 13727	VAH, EN 1650 prEN 13624	HIV, HBV, HCV	-----

## 使用上について

開封後の使用期限は？

ご使用後に蓋や密閉フィルムを完全に閉めて保管していただければ、3ヶ月の有効期限を保証致します。

マイクロジッドで靴の消毒は可能ですか？

マイクロジッドで靴(内部)の消毒はできます。  
靴(内部)の菌類に対して迅速な効果を得られます。

指示された接触時間を維持することが必要ですか？

マイクロジッドを使用して消毒した表面が、完全に乾燥しますと所定の効果を得ることができます。  
但し、著しく汚染された表面には、関係法規に従って接触時間を決める必要があります。

マイクロジッド® センシティブは、超音波プローブの消毒に使用できますか？

ご使用いただけます。  
超音波プローブを含めて、アルコールに敏感な材質へのご使用に適しています。

材質適合性を確認された機械器具類メーカーを教えてください。

マイクロジッドAF及び、マイクロジッド センシティブは、下記のメーカーの製品に対する、外部専門家による材質適合性証明を得ています。

マイクロジッド® センシティブ	マイクロジッド® AF
Philips   ultrasonic probes	KaVo   lacquer samples
Bayer   Vivak® clear 099	Hartmann   blood pressure cuff
Sirona   dental units	Vowalon surface coatings
Karl Storz   endoscopes*	A. Menarini Diagnostics   blood sugar measurement

\* 最終消毒用ではありません。

マイクロジッドで器具類(はさみ、ピンセットなど)を消毒することはできますか？

マイクロジッドは、表面の消毒用ですので、ご使用できません。  
器具類は、浸漬による消毒が必要ですので、ギガセプト インストゥルや、ギガセプト エンザマティックをご使用ください。

マイクロジッドの廃棄方法は？

マイクロジッドは、有害廃棄物ではありません。  
ご使用される自治体の規則に従って、廃棄してください。

水筒の注ぎ口の消毒に使用できますか？

ご使用できます。マイクロジッドは、食品安全性証明書を取得しています。  
但し、消毒後は、必ずきれいな水ですすいでください。

グローブの着用は必要ですか？

消毒を行なう場合は、皮膚への影響を防ぐ為、グローブの着用をお奨めします。

## 材質適合性について

どの製品が、どんな種類の材質や場所に適していますか？

マイクロジッド センシティブは、アルコールに敏感な表面（アクリルガラスや超音波プローブなど）の消毒に適しています。

マイクロジッドAFは、治療用設備や医療機器の表面など感染リスクの高い場所へ、短時間で効果を発揮します。

## その他

マイクロジッドAFとマイクロジッド センシティブの違いは？

マイクロジッドAFは、アルコールベースで短時間の接触で効果を発揮します。

マイクロジッド センシティブは、アルコールを含まない消毒物質溶液です。

アルコールをベースとしたマイクロジッドAFは、飲食できますか？

マイクロジッドAFは、合成アルコールです。

一般的な飲食用天然アルコールとは、違いますので飲食できません。

食品加工設備で消毒に使用されることについては、問題ありませんが、食品と接触しないように注意が必要です。

従いまして、その場合は、消毒後に十分な乾燥または、清浄な水ですすいでください。

On the surface,  
ready, go!





## schülke worldwide:

### **Austria**

Schülke&Mayr Ges.m.b.H.  
1070 Vienna  
Phone +43-1-523 25 01 0  
Fax +43-1-523 25 01 60

### **China**

Schülke&Mayr GmbH  
Shanghai Representative Office  
Shanghai 200041  
Phone +86-21-62 17 29 95  
Fax +86-21-62 17 29 97

### **France**

Schülke France SARL  
94250 Gentilly  
Phone +33-1-49 69 83 78  
Fax +33-1-49 69 83 85

### **Germany**

Schülke&Mayr GmbH  
22840 Norderstedt  
Phone +49-40-521 00 0  
Fax +49-40-521 00 318

### **India**

Schulke India Pvt. Ltd.  
New Delhi 110044  
Phone +91-11-40 55 02 00  
Fax +91-11-40 55 02 01

### **Italy**

Schülke&Mayr Italia S.r.l.  
20148 Milano  
Phone +39-02-40 21 820  
Fax +39-02-40 21 829

### **Malaysia**

Schülke&Mayr Sdn Bhd.  
47301 Petaling Jaya, Selangor  
Phone +60-3-78 85 80 20  
Fax +60-3-78 85 80 21

### **Netherlands**

Schülke&Mayr Benelux B.V.  
2032 HA-Haarlem  
Phone +31-23-535 26 34  
Fax +31-23-536 79 70

### **Poland**

Schulke Polska Sp. z o.o.  
01-793 Warszawa  
Phone +48-22-568 22 02-03  
Fax +48-22-568 22 04

### **Singapore**

Schülke&Mayr Pte. Ltd.  
Singapore 768767  
Phone +65-62-57 23 88  
Fax +65-62-57 93 88

### **Switzerland**

Schülke&Mayr AG  
8003 Zurich  
Phone +41-44-466 55 44  
Fax +41-44-466 55 33

### **United Kingdom**

Schülke&Mayr UK Ltd.  
Sheffield S9 1AT  
Phone +44-114-254 35 00  
Fax +44-114-254 35 01

... plus our international distributors

### **Schülke&Mayr GmbH**

22840 Norderstedt | Germany  
Phone | Fax +49 - 40 521 00 - 0 | -318  
www.schuelke.com

A company of the  
Air Liquide Group 

株式会社アクア・ラボ

東京都立川市柴崎町4-3-18

TEL:042-548-2878 FAX:042-521-3121