

schülke 

歯科用吸引システムの除菌・洗浄剤

## アスピロマテック<sup>®</sup>

### 特長

- ・アルデヒド類は、含んでおりません。
- ・安全で簡便性に優れています。
- ・広範囲な実地試験に基づき、全ての合金製防臭弁に影響を与えないことが、確認されています。
- ・器具類に影響を与える物質は含んでおりません。
- ・経済性に優れています。

### 調整溶液

アスピロマテックは、除菌及び洗浄に必要な、安全性を保証いたします。

### 適用範囲

歯科用吸引システム及び、スピットン等の除菌・洗浄用

### ご使用方法

吸引システムは、毎日のご使用により様々な有機物質・無機物質が蓄積されます。また、配管内部に乾燥付着した汚染物質により、フィルター交換の際に感染する危険があります。これらの危険や吸引システムの故障防止の為に、アスピロマテックによる除菌・洗浄をお奨めいたします。2%に希釈したアスピロマテックを用いて、毎日2回洗浄してください。

### 微生物学的効果

アスピロマテックは、次のものに対して有効です。  
 バクテリア及び菌類、ウイルス  
 (DGHM ガイドライン)

### 適用濃度及び浸漬時間

バクテリア及び菌類	2% - 30分
-----------	----------

### 成分

アスピロマテック100g中に7.5gのジオチルジメチル塩化アンモニウム、5%以下の非イオン界面活性剤、芳香剤、防触剤を含みます。  
 (EC指令 648/2004)

### 化学的物理的データ

外観 : 透明青色  
 pH : 約7.0  
 密度(20°C) 約 0.99g/ml

### 2%希釈溶液:

外観: 乳青色 pH: 約8.0

# アスピロマティック®

## EEC 指令による注意

(濃縮液に適用)

**Xi:** 刺激性

**R36/38:** 目と皮膚を刺激

**S26:** 目に入った場合は、直ぐに多量の水ですすぎ、医師に相談してください。

**S37:** 手袋着用

## 使用上のご注意

- ・ご使用の際は、手袋を着用してください。
- ・有効期限の切れた製品は、ご使用にならないでください。

## ご注文単位

容器サイズ	梱包単位	コード
2 L 容器	2 L × 5本	150 102
希釈容器	200個/箱	183 401

## アクセサリ

	コード
アスピロマティック® ドーズー(希釈容器)	150 106 183 401

専用希釈容器(ドーズー)は、アスピロマティック2L容器に簡単に装着できます。蓋を閉じて2L容器を傾けて、濃縮液をドーズーに満たします。安全に濃縮液を計量することができます。

## 環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、安全で環境にやさしい製品をご提供します。

## ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページをご参照いただくか、下記のお客様相談窓口にお問合せください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口

(シュルケ&マイヤー 本社)

TEL: +49 (0) 402152100-666

(日本総代理店)

株式会社アクア・ラボ

TEL: 042-548-2878

[schuelke@aqualab.co.jp](mailto:schuelke@aqualab.co.jp)



EMA  
E & FTE  
UMWELTMANAGEMENT  
REG.-NR. 004567-MP23



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485. and has a validated environmental management system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg. No. 004567-MP23) and the Eco Audit Regulation (Reg. No. DE-150-00003)

Schülke&Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0)40-52100-149  
Fax +49 (0)40-52100-316  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr UK Ltd.  
Anker Road  
GB-Sheffield S9 1AT  
Phone +44 (0)1142-5435  
Fax +44 (0)1142-5435-100  
mail.uk@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0)1-5232501 - 0  
Fax +43 (0)1-5232501 - 60  
office.austria@schuelke.com