



デンタボンは活性酵素系除菌剤です。  
アルデヒドは含まれておりません。

## デンタボン<sup>®</sup>

### 特徴

- 10分で広範囲の効果が得られます
- 作製した溶液の効果は1日続きます。
- すすぎの心配はありません。
- 強力な洗浄力で血液や唾液などの汚れを溶かし、  
酒石の除去を促進します。

### 適用範囲

シリコン、ポリエーテル系及び、アルギン酸塩、寒天から作成された印象材や、補修材、義歯などに使用できます。

### 使用方法

デンタボン溶液の効果は、1日中継続しますので十分な微生物学的効果を保証致します。但し、ご使用中のデンタボン溶液が過度に汚染された場合は、その都度、新しく作製してください。

印象体除菌の効果は、シリコン、ポリエーテル系及び、アルギン酸塩などの全ての材料に対する試験で証明されています。

デンタボン1%溶液で5～30分間浸漬する事により、ウイルスやバクテリアを非活性化します。

ウイルスやバクテリアの歯科技工所への伝染伝達を避ける為に、印象体の除菌は、常に歯科診療所で実施される事をお奨め致します。

### 使用濃度及び浸漬時間

濃度	浸漬時間
1% (2ℓのぬるま湯に専用スプーン(20g)1杯を溶かします。)	5～30分以内

印象体の性状に影響をおよぼす可能性がありますので、30分以内でご使用ください。

### 微生物学的効果

5～30分の浸漬により、バクテリア、菌類、ウイルスに対して有効です。

### 製品データ

構成成分: 本品100g中に以下の成分を含みます。  
ペルオキシモノサルフェートカリウム45g、  
陰イオン界面活性剤5～15%、非イオン界面活性剤5%、石鹼5%、ホスホン酸塩5%、香料

#### 化学的物理データ

外観: 薄黄色粒 内容量: 約775g  
保存温度: -5℃～室温  
溶液: 無色透明 pH: 約6.8

## EC指令による表示

- Xi** : 刺激物  
**R36/38**: 目や皮膚に刺激を与えます。  
**R52** : 水生生物に有害です。  
**S26** : 目に入った場合は、直ちに流水ですすぎ、  
医師に相談してください。  
**S28** : 皮膚に触れた場合は、大量の水で直ちに洗い  
流してください。

## ご使用上の注意

本品をご使用の際は、印象体メーカーの指示がある場合は、その指示に従ってご使用ください。  
材質によっては、印象体へ面荒れなどの影響を及ぼす場合がありますので、影響が無い事を確認してご使用ください。  
保存する場合は、蓋がしっかりと閉まっている事を確認して、冷暗所に保管してください。

- 本品は、飲食できません。
- 目や皮膚に直接触れない様に、保護メガネやゴム手袋を使用してください。
- 目や皮膚に触れた場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、医師に相談してください。
- デンタボン溶液は、敏感な繊維を漂白する場合があります。
- デンタボン溶液は、超音波洗浄器にもご使用いただけます。

## 製品コード及び、梱包単位

容量	梱包単位	商品コード*
900g缶 計量スプーン付き	900g 4缶/箱	125 203

## アクセサリ

	商品コード*
溶液作製用専用容器	145 004

## 環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、安全で環境にやさしい製品をご提供します。

## ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページをご参照いただくか、下記のお客様相談窓口にお問い合わせください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口  
(シュルケ&マイヤー 本社)  
TEL:+49(0) 402152100-666

(日本総代理店)  
株式会社アqualab・ラボ  
TEL:042-548-2878  
<http://www.aqualab.co.jp>  
[schuelke@aqualab.co.jp](mailto:schuelke@aqualab.co.jp)

(販売)  
株式会社モリタ  
大阪府吹田市垂水町3-33-18  
TEL:06-6338-7241  
<http://www.dental-plaza.com>



EMA  
E. R. FTE  
UMWELTBIAURGEMENT  
REG-MR-D45 - 3



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (**Reg.-No. 004567-MP23**) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (**Reg.-No. DE-150-00003**)

**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0)40-52100 - 0  
Fax +49 (0)40-52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)