

ギガセプト インストウル AF[®]



特徴

- ヨーロッパの新基準に従っています。
- 微生物学上の広い範囲に効果があります。
- アルデヒドは含んでおりません。
- 3%希釈液で使用できるため、非常に経済的です。
- 医療機器のCEマークに適合。
- 爽快で新鮮な芳香。

製品タイプ

アルデヒドを含まない高機能除菌・洗浄剤です。

歯科・外科用をはじめとする機器類の除菌・洗浄に安心してご使用いただけます

浸漬洗浄に最適です。

超音波洗浄器にもご使用いただけます。

製品 データ

ギガセプト インストウル AF 100g中に以下の成分を含みます。

ココスプロフェンジアミンジアセテート 14g
フェノキシプロパノール 35g
ベンザルコニウムクロライド 2.5g

(その他の含有物質)

5-15%の非イオン界面活性剤、溶剤、pH調整液、防蝕剤、着色剤、芳香剤

化学 / 物理的データ

原液	3% 希釈溶液:
外観: 透明な緑色	外観: 透明な緑色
pH 値: 約 9.3	pH 値: 約 8.5

微生物学的効果 / 連続使用有効期間

- 抗菌性、抗真菌性、抗酸菌性に優れています。(DGMH適合)
- ウィルス類に有効です。
- 7日間の連続使用が可能です。

使用濃度 / 浸漬時間

効果	0.5%	3%
バクテリア かび 菌類 真菌類 抗酸菌類		15分
ウィルス類	5分	

- 推奨希釈濃度及び、浸漬時間は以下の通りです。

3%希釈溶液 15分

ご使用方法

- ギガセプト インストウルAFは、濃縮液です。ご使用に際しては、推奨濃度に、希釈してご使用ください。
- 器具類の内部に空気などが残らないように、完全に浸してください。
- 器具類への損傷を防ぐため、希釈濃度及び浸漬時間に注意してください。
- 浸漬時間が経過しましたら、流水でよく洗浄してください。
- 除菌・洗浄後に加圧滅菌する場合は、器具類をよく乾燥させてください。

連続使用時間

ギガセプト インストウル AFは、連続して7日間ご使用できます。但し、汚れがひどい場合は、早期の交換をお奨めします。

材料適合性

以下の材料に使用できます。

- 金属
- ゴム
- ガラス
- 磁器
- プラスチック類

ご注意

ギガセプト インストウル AFの原液または希釈溶液を他の製品(特にアルデヒドを含むもの)と混合した場合、変色・有効性の毀損・沈殿などが生じることがありますので、絶対に他の製品と混合することは、避けてください。

はじめてご使用される場合は、洗浄用の容器を水などで洗浄し、汚れを除去してからご使用ください。

EC 指令による表示

- C:** 腐食剤
R34: 火傷の恐れがあります
S26: 目に入った場合は、直ちに流水ですすぎ、医師に相談してください。
S36/37/39: 適切な防護服、フタルコム製手袋および、目や顔を保護する保護器を着用してください。
S45: はきけやめまいなど体に変調をきたした場合は、医師に相談してください。

環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、安全で環境にやさしい製品をご提供します。

ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページをご参照いただくか、下記のお客様相談窓口にお問合せください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口
(シュルケ&マイヤー 本社)
TEL:+49 (0) 402152100-666

(日本総代理店)
株式会社アクア・ラボ
TEL: 042-548-2878

<http://www.aqualab.co.jp>
[schuelke @aqualab.co.jp](mailto:schuelke@aqualab.co.jp)