

schülke →



アルコール系除菌剤をしみこませた
クロスタイプ(不織布)除菌製品です。

マイクロジッド® AF ワイプス

特長:

- そのままご使用いただけます。
- 短時間で非常に広範囲の除菌効果が得られます。
- 速乾性です。
- 200枚入りです。

適用範囲:

医療機器用のアルコールベースの除菌剤です。例えば、下記の様な感染リスクの大きい場所や、全ての領域において、短い時間で大きい効果が得られます。

- ・患者治療ユニット
- ・検査用椅子・机
- ・手術台や周辺環境
- ・医療機器の表面

CE 297

微生物学的効果:

下記の感染源に対して効果があります。

- ・細菌
- ・芽包菌類
- ・ウイルス

使用時間:

対 象	保持時間
細菌 (DGHM規則に基づく)	1分
菌類	1分
菌類	1分
ウイルス	30分
ウイルス ※1	30秒
ウイルス	2分
ウイルス ※2	1分
ウイルス	30秒
ウイルス	30分
ウイルス	15分
ウイルス	30秒
病院内・医療用機器の表面	5分
ÖGHMP 専門的技術 No95/8	1分

※1 GFHG 01/2004

※2 EN 14476

詳しいデータは、弊社までお問い合わせください。

マイクロジッド® AF ワイプス

製品データ:

本製品に含有薬液1g中に以下の成分を含みます。0.25gのエタノール(94%)、0.35gの1-プロパノール

化学的物物理的データ

含有薬剤として:

外観 : 無色透明の液体
密度(20℃) : 約0.89g/cm²
粘度 : <15 s.
適用温度 : -5℃~40℃
pH : 約 6.0
引火点 : 27℃

ご使用方法:

クロスに薬液が十分に含浸した状態で、除菌したい表面を拭きます。

その際、拭き残しの無いようご注意ください。

広い範囲でご使用される場合は、複数枚を使用してください。

EC指令:

R10: 引火性がある

使用上のご注意:

- 目に入らないようにしてください。
- 保護手袋の着用をお勧めいたします。
- アクリルガラスなどのアルコールに敏感な材質には使用しないでください。
ひび割れ・白濁などが生じる場合があります。

環境情報:

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、安全で環境に優しい製品をご提供します。

ご意見ご質問:

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページをご参照いただくか、下記のお客さま相談窓口にお問い合わせください。

TEL: 49(0)40-521 00-666

Email: info@schuelke.com

【日本総代理店】

株式会社アクア・ラボ

TEL: 042-548-2878

Email: schuelke@aqualab.co.jp



Schuelke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No-004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with The Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003)

Schülke&Mayr GmbH

22840 Norderstedt, Germany

Phone +49(0) 40 52100-0

Fax +49(0) 40-52100-318 www.schuelke.com

Mail@schuelke.com