



# schülke

そのまま使用できます。  
アルコールを含みません。  
不織布タイプですので、  
除菌・清掃する表面を傷めません。

## ミクロジッド センシティブ ワイプス<sup>®</sup>

### 特徴

アルコールは含んでおりません。  
除菌剤を浸み込ませたクロスタイプです。  
アクリルガラスなどのアルコールに敏感な表面に、  
使用可能で、非常に高い即効性があります。

### 使用時間

バクテリア、菌類	1分
ウイルス ※	1～30分

※ ウィルスの種類によって異なります。

### 適用範囲

器具類や椅子、診察台などの除菌・清掃用として  
特にアルコールに敏感な表面（アクリルガラスや  
プレキシガラス、超音波振動子など）に適して  
います。

### 取扱説明

湿らせても良い表面である事を確認して  
ください。  
広い場所で使用される場合は、汚れ具合に  
応じて、数回に分けてご使用ください。

### 微生物学的効果

バクテリア・菌類・ウイルスに効果があります。

### 製品データ

本製品100g中には、0.26gの第4級アンモニウム化合物、  
ベンジル-C12-C16-アルキルジメチル、0.26gの塩化ジデシル  
メチルアンモニウム、C12-14-アルキルエチルフェニルジメチル塩を  
含まず。

#### 化学及び物理学的データ

溶液の外観：無色透明な液体  
密度(20℃) 約 0.998g/ml 粘度：15S以下  
適応温度：-5℃～40℃  
pH：6.0～8.0

# マイクロジッド センシティブ ワイプス®

## 使用上の注意

ニトリルゴムなどの手袋を着用してください。  
ご使用前にラベルに記載された事項を良く  
お読みください。

## 注文単位

商品名	単位	商品コード
200枚入り容器	10本	109 184

## 環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ  
安全で環境にやさしい製品をご提供します。

## ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページ  
をご参照いただくか、下記のお客様相談窓口  
にお問合せください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口  
(シュルケ&マイヤー 本社)  
TEL: +49(0) 402152100-666

(日本総代理店)  
株式会社アクア・ラボ  
TEL: 042-548-2878  
[schuelke@aqualab.co.jp](mailto:schuelke@aqualab.co.jp)

販売  
株式会社モリタ  
大阪府吹田市垂水町3-33-18  
TEL:06-6338-7241



EMA  
E K STE  
UMWELTMANAGEMENT  
REG.-NR. DE-15 - 3



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001  
and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental  
system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003)

Schülke&Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0)40-52100 - 0  
Fax +49 (0)40-52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)