



そのまま使用できます。  
アルコールを含みません。  
不織布タイプですので、  
除菌・清掃する表面を傷めません。

## mikroZID® センシティブ ワイプス® mikroZID® センシティブ ワイプス プレミアム®

### 特徴

アルコールは含んでおりません。  
除菌剤を浸み込ませたクロスタイプです。  
アクリルガラスなどのアルコールに敏感な表面に  
使用可能で、非常に高い即効性があります。

高品質な厚手クロスは、広い範囲を1枚で除菌・  
清掃できます。(プレミアム)

### 適用範囲

器具類や椅子、診察台などの除菌・清掃用として  
特にアルコールに敏感な表面(アクリルガラスや  
プレキシガラス、超音波振動子など)に適していま  
す。

### 取扱説明

湿らせても良い表面であることを確認してください。  
広い場所で使用される場合は、汚れ具合に応じて  
数回に分けて使用してください。

### 微生物学的効果

バクテリア・菌類・ウイルスに効果があります。

### 使用時間

バクテリア・菌類	1分
ウイルス ※	1分
ウイルス ※	30分

※ ウィルスの種類によって異なります。

### 製品データ

本製品100g中には、0.26gの第四級アンモニウム化合物  
ベンジル-C12-C16-アルキルジメチル、0.26gの塩化ジデシル  
メチルアンモニウム、C12-14-アルキルエチルフェニルジメチル塩を  
含みます。

#### 化学及び物理学的データ

液体の外観: 無色透明な液体  
密度(20°C): 約0.998g/ml 粘度: 15S以下  
適用温度: -5~40°C  
pH: 6.0~8.0

# マイクロジッド センシティブ ワイプス<sup>®</sup> マイクロジッド センシティブ ワイプス プレミアム<sup>®</sup>

## 使用上の注意

ニトリルゴムなどの手袋を着用してください。  
ご使用前に、ラベルに記載された事項を良く  
お読みください。

## 環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、  
安全で環境に優しい製品をご提供します。

## 注文単位

商品名	梱包単位	商品コード
マイクロジッド センシティブ ワイプス 200枚入り容器	10本/箱	109 184
マイクロジッド センシティブ ワイプス プレミアム 48枚入りソフトパック	20パック/箱	165 710

## ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページ  
をご参照いただくか、下記のお客様相談窓口にお問い  
合わせください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口 (シュルケ&マイヤー 本社)  
TEL:+49 (0) 402152100-666

## 高品質で優れた経済性

### マイクロジッド センシティブ ワイプス プレミアム<sup>®</sup>

手軽なソフトパック

高品質厚手クロス

柔軟性に富み、破れにくい材質

1枚で広い範囲を除菌・清掃

ワンプッシュ密着蓋で乾燥防止



【日本総販売元】  
株式会社アクア・ラボ  
TEL:042-548-2878  
[schuelke@aqualab.co.jp](mailto:schuelke@aqualab.co.jp)



EMA  
E K STE  
UMWELTMANAGEMENT  
REG-NO. 045 - 3



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001  
and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental  
system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003)

**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0)40-52100 - 0  
Fax +49 (0)40-52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)