

schülke 

テラリン[®] プロテクト

芳香性アルコール、第4アンモニウム化合物、グリシン誘導体及び、非イオン界面活性剤による除菌剤です。

特徴

アルデヒド類は含んでおりません。
優れた洗浄力と保護力
微香性

適用範囲

- ・医療機器(CE0297)及び、衛生の安全性が重要な施設内の全てのエリア
- ・特に匂いに敏感な場所
- ・アクリルガラスなどアルコールに敏感な材質
- ・製薬、化粧品生産施設など

これらの除菌・洗浄に最適です。

ご使用方法

ご使用用途に合わせて希釈溶液を準備します。
ご使用前に水で湿らせた布で、表面を拭いてください。

本品と陽イオン成分を含む他の製品と混合しないでください。

もし、他の製品と混合して使用される場合は、事前に弊社までお問合せください。

テラリン プロテクトは、除菌・洗浄力に優れた製品です。その為、他の製品と混合してご使用いただく必要はありません。

微生物学的有効性

テラリン プロテクトは、以下のものに有効です。
バクテリア・菌類・ウイルス

濃度及び浸漬時間（下表は目安です）

	5	15	30	60	90	120	240
バクテリア		2 % (20 ml/l)		0.5 % (5 ml/l)			0.25 % (2.5 ml/l)
菌類				0.5 % (5 ml/l)			0.25 % (2.5 ml/l)
ウイルス		1 % (10 ml/l)				0.5 % (5 ml/l)	
ウイルス		1 % (10 ml/l)		0.5 % (5 ml/l)			
ウイルス		0.25 % (2.5 ml/l)					
ウイルス		0.5 % (5 ml/l) 1 % (10 ml/l)					
ウイルス							2 % (20 ml/l)
ウイルス						1 % (10 ml/l) 2 % (20 ml/l)	
浴槽	Conc.						

Robert Kouh研究所のガイドラインによります。

テラリン® プロテクト

PREMIUM ZUR RM		食品産業協会の範囲のEU基準による 試験結果		
EN 1276	(fungicidal, with load)	0.5 % (5 ml/l)	60 min.	2 h
EN 1650	(fungicidal, with load)	0.5 % (5 ml/l)		
EN 13 697	(bactericidal, with/without load, quantitative surface test)	0.5 % (5 ml/l)		
EN 13 697	(fungicidal, with/without load, quantitative surface test)	0.5 % (5 ml/l)		
EN 14 476				1 % (10 ml/l)
EN 14 348		0.5 % (5 ml/l)		

製品データ

組成:本品100g中
塩化ベンザルコニウム22g、2-フェノキシエタノール
17g、アミノアルキルグリシン0.9g、非イオン界面活性
剤5-15%、芳香剤
(EC No.648/2004)

化学及び物理学的データ
色 :透明な緑
PH :約8.6
密度:約1.01g/cm³ (20°C)

EC 指令による表示

※ 濃縮液

- C:** 腐食性
R22: 飲料物ではありません。
R34: 火傷の危険性があります。
S26: 目に入った場合は、直ちに多量の水ですすぎ、医師の処
置を受けてください。
S35: 安全な場所に保管してください。
S36/37/39: ご使用の際は、ブチレンゴムなどの保護手袋を着用して
ください。
S45: ご使用中に体の具合が悪くなった場合は、直ちに医師の
処置を受けてください。

使用上の注意

ご使用前に注意事項を良くお読みいただき、正しくご使
用ください。

アクセサリ

	Art. Nr.
2リットル容器用希釈ディスペンサー	183401
5リットル容器用蓋	135 501
30リットル容器用蓋	126101
5リットル容器用希釈ディスペンサー	117 101
30リットル容器用希釈ディスペンサー	182501
5リットル容器用オープナー	135810
30リットル容器用オープナー	135 901
計量用500ml ビーカー	136101
専用漏斗	117 901

※ 詳しくは、弊社までお問合せください。

環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、
安全で環境にやさしい製品をご提供します。

ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームペー
ジをご参照いただくか、下記のお客様相談窓口
にお問合せください。

<http://www.cshuelke.com>

お客様相談窓口
(シュルケ&マイヤー 本社)
TEL:+49 (0) 402152100-666

(日本総代理店)
株式会社アクア・ラボ
TEL: 042-548-2878
schulke@aqualab.co.jp



EMA
E K FIE
UMWELTMÄNNER EMMENT
REG.-NR. D-15 - 3



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001

And DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental
System in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003)

Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany

Phone+49(0)40-52100-0
Fax +49(0)40-52100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com